

%5 KLOR SOLÜSYONU İLE YÜKSEK DÜZEYDE DEZENFEKSİYON (YDD)

Gerekli malzeme:

- Plastik kova (YDD edilmiş)
- %5'lik klor içeren çamaşır suyu
- Su
- Ölçü kabı
- Metal kap (1 adet)

- Kapaklı metal kap (3 adet)
- 20 dk kaynatıp soğutulmuş su
- Bulaşık eldiveni (YDD edilmiş)
- Tıbbi araç (pansuman, dikiş seti vb)

BASAMAKLAR

1

- Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama: Plastik bir kovaya 1 ölçü %5'lik KLOR + 9 ölçü SU koyunuz

2

- Her iki ele bulaşık eldiveni giyiniz.

3

- Dekontamine edilip, yıkanmış aletleri solüsyona koyunuz.

4

- Dekontamine edilip, yıkanmış aletleri solüsyona koyunuz.

5

- Aletleri çıkarıp, YDD edilmiş kapta, kaynatılıp soğutulmuş su ile durulama, kurumaya bırakın.

6

- Temiz ve kuru bir ortamda veya YDD kapalı bir kap içinde saklayınız.